

neu



Säubern, stärken,
schützen.

Prophylaxe mit System



We never stop solving for you!

Im April 2024 wurde das Healthcare-Geschäft der 3M erfolgreich in ein eigenständiges, börsennotiertes Unternehmen mit dem Namen Solventum ausgegliedert, das nun als passionierter Weltmarktführer im Gesundheitswesen durchstartet.

Mehr als 16.000 Produkte für die Prophylaxe, Kieferorthopädie, Zahnerhaltung und Prothetik werden an zahlreichen Standorten weltweit – unter anderem im oberbayerischen Seefeld – entwickelt, produziert und vertrieben. Unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards entstehen beispielsweise innovative Füllungsmaterialien der Marke Filtek, detailtreue A-Silikon- und Polyether-Abformmaterialien der Marken Imprint und Impregum, leistungsstarke Befestigungsmaterialien der Marken Scotchbond, RelyX und Ketac sowie ästhetische kieferorthopädische Apparaturen der Marke Clarity.

In Übereinstimmung mit der Mission von Solventum wurden sie alle entwickelt, um eine bessere, intelligentere und sicherere Gesundheitsversorgung zu ermöglichen und dadurch die Lebensqualität von Patienten zu verbessern.

Vielen Dank, dass Sie als Partner von Solventum dieses neue Kapitel mit uns aufschlagen.

Sie sind der Schlüssel zu unserem Erfolg, die Menschheit voranzubringen, indem wir die Gesundheitsversorgung für alle verbessern. Von unserem kompetenten und motivierten Team dürfen Sie den gleichen großartigen Service erwarten, den Sie gewohnt sind – und Sie erhalten zusätzlich das Versprechen, dass wir nie aufhören werden, Lösungen für Ihre Herausforderungen zu finden.

3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder

Pulver zur supra- und subgingivalen Plaqueentfernung

Sanft zur Zahnschmelz, gnadenlos zu Zahnbelägen, einsetzbar in allen gängigen Pulverstrahlgeräten.

Erfunden in Seefeld!

Seit 2001 auf dem Markt

Bessere Reinigungsleistung als Erythritol-Pulver.

Die supra- und subgingivale Plaqueentfernung ist eine wichtige prophylaktische Maßnahme, die stets Bestandteil der professionellen Zahnreinigung ist. Ziel ist die effiziente Keimreduktion sowie die Schaffung einer glatten Oberfläche, welche die Anlagerung neuer Plaque reduziert.

Sanft zur Zahnschmelz, gnadenlos gegen Keime: Clinpro Prophy Powder hat sich als glycinbasiertes Prophylaxepulver für Pulver-Wasserstrahl-Geräte bewährt. Es eignet sich zur besonders sanften Entfernung von Plaque und Verfärbungen auf supra- und subgingivalen Schmelz-, Dentin- und Wurzeloberflächen, Implantaten und kieferorthopädischen Apparaturen.

Kompatibel mit EMS Pulverstrahlgeräten



- Entfernung von supra- und subgingivaler Plaque sowie von Verfärbungen
- Minimale Abrasion bei gleichzeitig hoher Reinigungsleistung
- Schnelles und angenehmes Reinigen für Ihre Patienten
- Mittlere Korngröße von nur 20 – 25 µm
- Sichere Entfernung von Plaque auf weichen Wurzeloberflächen, Implantaten und kieferorthopädischen Brackets
- Reduziert nachweislich die Bakterien im Sulkus und trägt zur Verringerung der Zahnfleischtiefe in der unterstützenden Parodontitis-therapie (UPT) bei.
- Schonender zur Zahnhartsubstanz als konventionelle Verfahren, die mit Küretten und Scalern arbeiten
- Mehr als 20 Jahre klinische Erfahrung – Vielzahl an Studien

Qualität made in Germany!

- 01 Rund um kieferorthopädische Brackets
- 02 Auf Implantaten und Füllungen
- 03 Rund um den Zahnfleischrand



Anwendungsbereiche:

Air-Polishing bei der Professionellen Zahnreinigung	3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder	Bicarbonat-Prophy Powder
Supragingival	✓	✓
Subgingival Unterstützend bei der Gingivitis / Periodontitis-Therapie	✓	–
Restaurationsmaterialien / Brackets	✓	✓
Abutments / Implantate Unterstützend bei der Therapie periimplantärer Erkrankungen	✓	–

3M™ Clinpro™ Clear Fluorid

Wasserbasiertes Gel zur Behandlung überempfindlicher Zähne

Fluoridierung leicht gemacht.

Zur Behandlung überempfindlicher Zähne



Endlich eine Fluoridbehandlung, die sowohl Zahnärzte als auch Patienten lieben werden. Das neue Clinpro Clear Fluorid schmeckt besser, fühlt sich besser an und sieht besser aus als herkömmliche Fluoridlacke und ermöglicht zudem eine effektive Fluoridaufnahme bei geringerer Dosierung.

All dies ist einer vereinfachten, wasserbasierten Formulierung zu verdanken, die keinerlei klebrige Rückstände hinterlässt. Selbst das Applikationssystem ist simpel: Einfach ausdrücken und verarbeiten.

- Klare, wasserbasierte Formulierung im schnell und einfach anwendbaren L-Pop-Blister (Einzeldosis)
- Die Formulierung weist einen neutralen pH-Wert auf und ist frei von Harzen und häufigen Allergenen*
- Stabilisiertes Kalziumphosphat
- Minimale Kontaktzeit von nur 15 Minuten
- Von Patienten bevorzugt: Besser im Geschmack, Geruch und Mundgefühl
- Drei Geschmacksrichtungen: Minze, Wassermelone und neutral
- Effektive Aufnahme von Fluorid bei geringerer Dosierung als herkömmliche Fluoridlacke
- Enthält 2,1% Natriumfluorid (9.500 ppm)

*Angaben zu Allergenen unter 3Mdeutschland.de/ClinproClear

Schnelle und einfache Applikation.

Das einzigartige L-Pop Applikationssystem sorgt für eine verbesserte Anwendung.


- Die durchschnittliche Bewertung der Anwendungsfreundlichkeit von Clinpro Clear Fluorid betrug 97,2 von 100 Punkten
- Im Rahmen einer klinischen Studie schätzten 100 Prozent der teilnehmenden zahnmedizinischen Fachkräfte, dass die meisten Anwender Clinpro Clear Fluorid schnell korrekt anwenden würden.

Quelle: Intern. Daten bei 3M verfügbar.



Fluoridaufnahme in nur 15 Minuten.

3M™ Clinpro™ Clear Fluorid bietet eine größere oder vergleichbare Fluoridaufnahme wie eine herkömmliche 5-prozentige Fluoridlackbehandlung.

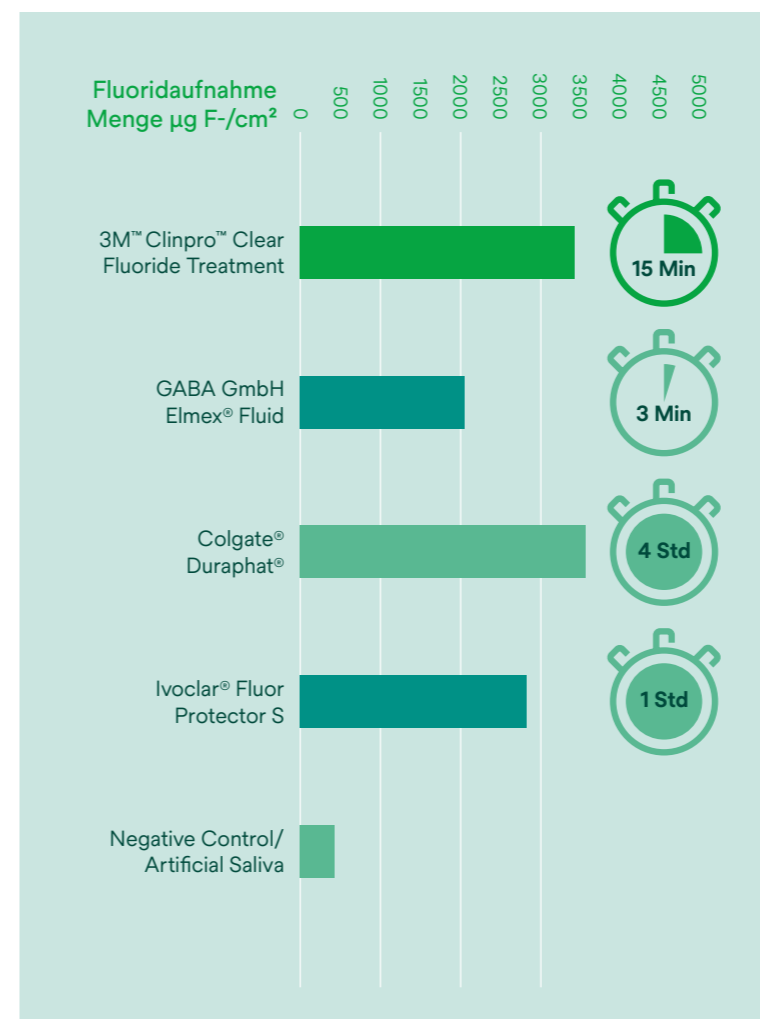

Die Fluoridbehandlung, die sich die Patienten wünschen.

Im Rahmen einer klinischen Studie bevorzugten Patienten und zahnmedizinisches Fachpersonal 3M™ Clinpro™ Clear Fluorid gegenüber Fluoridierungsschienen oder der Behandlung mit einem harzbasierten Fluoridlack.

Bewertung von Patienten:

93,8%

Glattes und angenehmes Mundgefühl

Bewertungen von zahnmedizinischem Fachpersonal:

98,0%

Einschätzung der Patientenzufriedenheit

Mehr Patientenkomfort eine Stunde nach der Behandlung

96%

Gefühl

96% der Patienten konnten auf ihren Zähnen keine Rückstände von 3M™ Clinpro™ Clear Fluorid mehr fühlen.

96%

Geschmack

96% der Patienten konnten auf ihren Zähnen keine Rückstände von 3M™ Clinpro™ Clear Fluorid mehr schmecken.

Anwender-Tipp:



In besonders schwerwiegenden Fällen von Hypersensibilitäten kann anstelle von Clinpro Clear auch 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv als Alternative eingesetzt werden.

3M™ Clinpro™ Tooth Crème mit fTCP*

Fluoridhaltige Zahncreme mit Tri-Calcium Phosphat

Schmerzlinderung und langfristige Reduktion des Kariesrisikos.




Für alle Patienten, die die positive Wirkung der zahnärztlichen Prophylaxe zu Hause unterstützen möchten, empfiehlt sich die regelmäßige Anwendung von Clinpro Tooth Crème.

Clinpro Tooth Crème mit 0,21% Natriumfluorid ist eine hochentwickelte Formulierung mit funktionalisiertem Tri-Calcium Phosphat (fTCP)*. Sie hilft bei der Vorbeugung und Reparatur von beginnenden Läsionen durch Remineralisation innerhalb der gesamten Läsion – nicht nur auf der Oberfläche.

*Funktionalisiertes Tri-Calcium-Phosphat, kurz fTCP, ist eine von 3M entwickelte und patentierte Technologie zur Unterstützung des natürlichen Mineralisierungsprozesses, die exklusiv in Clinpro Tooth Crème erhältlich ist.

- Schonende, sehr wirkungsvolle Reinigung von Zahnoberflächen mit niedriger Abrasion (73,9 PCR – 59,6 RDA)
- Enthält 0,21% (950 ppm) Fluoridionen
- Enthält fTCP* für die Remineralisation initialer Schmelzdefekte
- Stärkt den Zahnschmelz, schützt vor kariösen Defekten und reduziert White Spots
- Angenehmer Vanille-Minzgeschmack

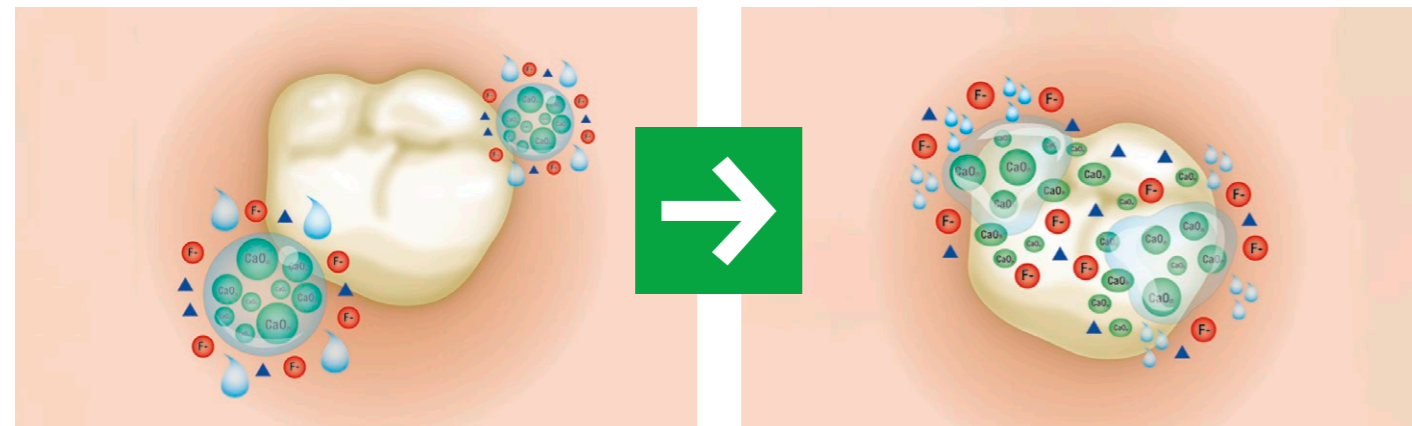

Der Speichel aktiviert fTCP und setzt gezielt Calciumionen frei. Diese wirken zusammen mit Phosphationen als Kristallisationskerne, die den Mineralisierungsprozess kontrollieren. Während Fluorid das Mineralwachstum fördert, fungiert fTCP als Reservoir für den Mineralisierungsprozess. Somit wirken Fluorid und fTCP synergetisch. Sie bilden relativ große, dicht gepackte Kristalle, die zu einer qualitativ hochwertigeren Mineralstruktur führen.

3M™ Clinpro™ XT Varnish

Langhaftender Fluoridlack

Schafft eine Barriere zwischen Zahn und schädigenden Substanzen.




Clinpro™ XT Varnish ist ein lichthärtendes kunststoff-modifiziertes Glasionomer-Versiegelungsmaterial.

Indikationen:


- Schutzlack zur Behandlung von Schmerzempfindlichkeit bei freiliegenden Wurzeloberflächen
- Lokaler Schutzlack zur Behandlung von risikoreichen, kariesanfälligen Bereichen (z. B. um kieferorthopädische Apparaturen, bei Schmelzläsionen oder bei erodierten Oberflächen)
- Temporärer Schutzlack für unreifen Zahnschmelz (z. B. Molaren im Durchbruch)

Clinpro XT Varnish dämmt die Milchsäureproduktion ein, wodurch die Zahnschmelz geschützt wird.

- Remineralisiert initiale Schmelzdefekte
- Reduziert White Spots
- Mineralisiert an der Oberfläche und in tieferen Schichten
- Mindestens sechs Monate anhaltender Effekt

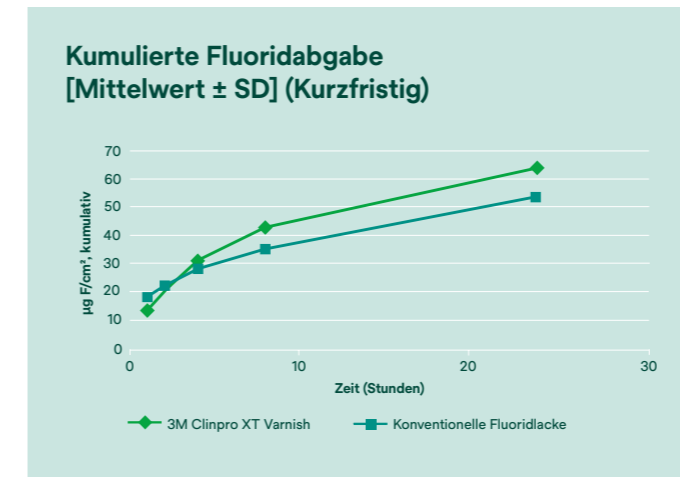

In vitro Tests zeigen, dass Clinpro XT Varnish innerhalb 24 Stunden mehr Fluoride freisetzt als ein konventioneller Lack.

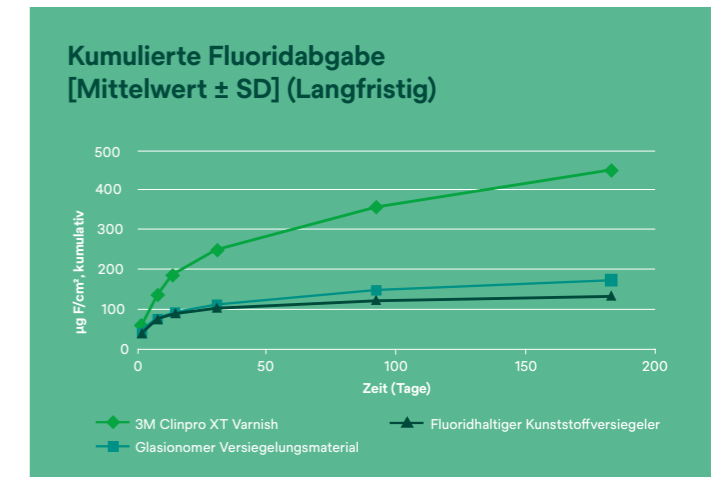

In vitro Tests zeigen, dass Clinpro XT Varnish über einen Zeitraum von 6 Monaten mehr Fluoride freisetzt als andere Lacke.

3M™ Clinpro™ Sealant

Fissurenversiegelung

Einfach in der Anwendung – sichere Kontrolle.



Eine wirksame Schutzmaßnahme zur Frühprävention gegen Karies bietet Clinpro Sealant. Das lichthärtende, Fluorid freisetzende Material wird zur Versiegelung von Fissuren und Schmelzdefekten eingesetzt.


Dank innovativer Farbwechsel-Technologie ist es bei der Anwendung gut erkennbar. Beim Auftragen auf die Zahnoberfläche erscheint Clinpro Sealant rosa – erst bei der Lichthärtung wechselt es zu einer opaken Zahnfarbe. Der deutlich erkennbare rosa Farbton hilft, das Material beim Versiegelungsvorgang exakt zu dosieren und gleichmäßig zu verteilen. Mit der ultrafeinen Kanüle aufgebracht, fließt es dank seiner niedrigviskosen Formulierung problemlos in Schmelzdefekte und Fissuren.

- Innovative Farbwechsel-Technologie
- Ultrafeine Kanüle (27 Gauge) zum einfachen und sauberen Applizieren
- Niedrigvisköse Formulierung

Farbwechsel-Technologie – der sichtbare Unterschied.

01 Vor der Lichthärtung
(Foto: Dr. Chris Bryant)

02 Nach der Lichthärtung
(Foto: Dr. Chris Bryant)

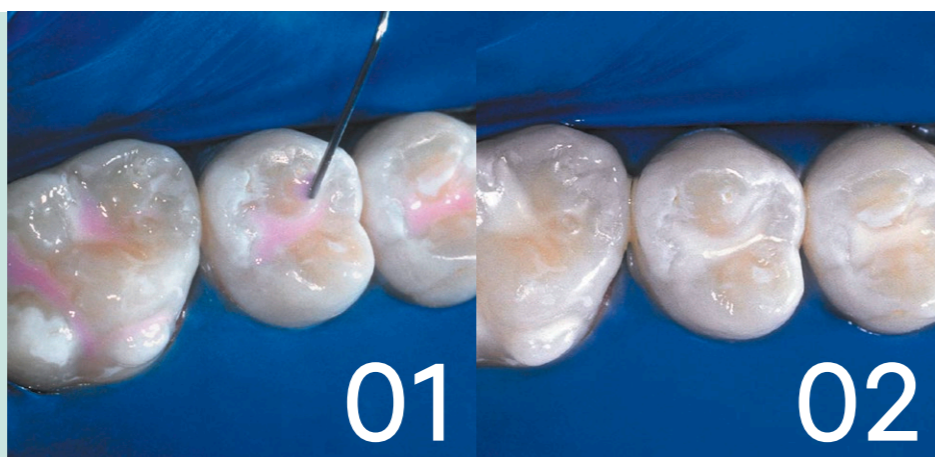

Bestellinformationen

3M™ Clinpro™ Glycine Prophy Powder – Pulver zur supra- und subgingivalen Plaqueentfernung

67008 Clinpro Glycine Prophy Powder
2 x 160 g

3M™ Clinpro™ Clear Fluorid – Wasserbasiertes Gel zur Behandlung überempfindlicher Zähne

Clinpro Clear Fluorid 50er Packung
50 Einzeldosen (0,50 ml L-Pop)

7300FF Geschmacksrichtung Neutral

7300M Geschmacksrichtung Minze

7300W Geschmacksrichtung Wassermelone

Clinpro Clear Fluorid 100er Packung
100 Einzeldosen (0,50 ml L-Pop)

7310FF Geschmacksrichtung Neutral

7310M Geschmacksrichtung Minze

7310W Geschmacksrichtung Wassermelone

3M™ Clinpro™ Tooth Crème mit TCP – Fluoridhaltige Zahncreme

12218 Clinpro Tooth Crème mit TCP
Fluoridhaltige Zahncreme mit Tri-Calcium Phosphat – Vanilla Mint

3M™ Clinpro™ XT Varnish – Langhaftender Fluoridlack

12348 Clinpro XT Varnish
1 3M™ Clicker™ 10 g, Anmischblock

3M™ Clinpro™ Sealant – Fissurenversiegelung

12636 Clinpro Sealant Intro Kit Spritzen
2 Spritzen Versiegler à 1,2 ml, 1 Spritze 3M™ Scotchbond™ Universal Ätzgel 3 ml, 20 Applikationskanülen für Versiegler (schwarz), 25 Applikationskanülen für Ätzgelspritzen (blau)

12637 Clinpro Sealant Refill Packung
1 Spritze Versiegler (1,2 ml), 10 Applikationskanülen für Versiegler (schwarz)

12632 Clinpro Sealant Refill Packung
1 Flasche Versiegler 6 ml

12626T Clinpro Sealant Refill Tips
10 Versiegler-Applikationsspitzen

3M™ Scotchbond™ Universal Adhäsiv – Selbstätzendes Adhäsiv

41263 3M Scotchbond Universal Ätzgel
2 Spritzen à 3 ml, 50 Applikationskanülen

41274 3M Scotchbond Universal Ätzgel Applikationskanülen
25 Applikationskanülen



**3M Health Care
ist jetzt Solventum**

Deutschland
ESPE Platz
D-82229 Seefeld

Schweiz
Eggstraße 91
CH-8803 Rüslikon

Österreich
Euro Plaza 4, Am Europlatz 2
A-1120 Wien



**Mehr
Informationen
zu Solventum**

info-dental@solventum.com
Solventum.com/de-de